



**LOGINDOOR**  
logística y distribución médica



## **ASPIRADOR DE SECRECIONES**

MANUAL DEL USUARIO

# ASPIRADOR DE SECRECIONES

## COMPONENTES

### 1. Válvula reguladora de vacío

Permite aumentar o disminuir la fuerza de aspiración.

Esta regulación se lleva a cabo girando la perilla de dicha válvula en un sentido o en otro, según su marcado.

### 2. Salida de aire

### 3. Válvula antidesborde

Evita que cualquier tipo de líquido o sólido ingrese al motor del aspirador. En caso de que dicha protección actúe, detener el proceso de aspiración y proceda a vaciar y limpiar el frasco (ver limpieza). Luego asegúrese de destrabar la válvula de su posición de bloqueo y continúe con el normal proceso de aspiración.

**Si por algún motivo ingresa algún tipo de líquido o sólido al motor del aspirador, detenga el proceso de aspiración, desconecte la unidad de la red de alimentación de energía eléctrica y contáctese con el servicio técnico de LOGINDOOR**

### 4. Filtro


El equipo se entrega provisto de un filtro, en serie con el circuito de aspiración, a los efectos proteger el motor, evitando que cualquier producto de los desechos de la aspiración, pueda dañar el equipo.

### 5. Frasco de recolección

### 6. Pico de aspiración

### 7. LLave interruptora

No utilice el equipo en caso de que algún componente, tal como frasco de recolección o las mangueras se encuentre dañado. Reemplácelos SÓLO por componentes suministrados por LOGINDOOR.

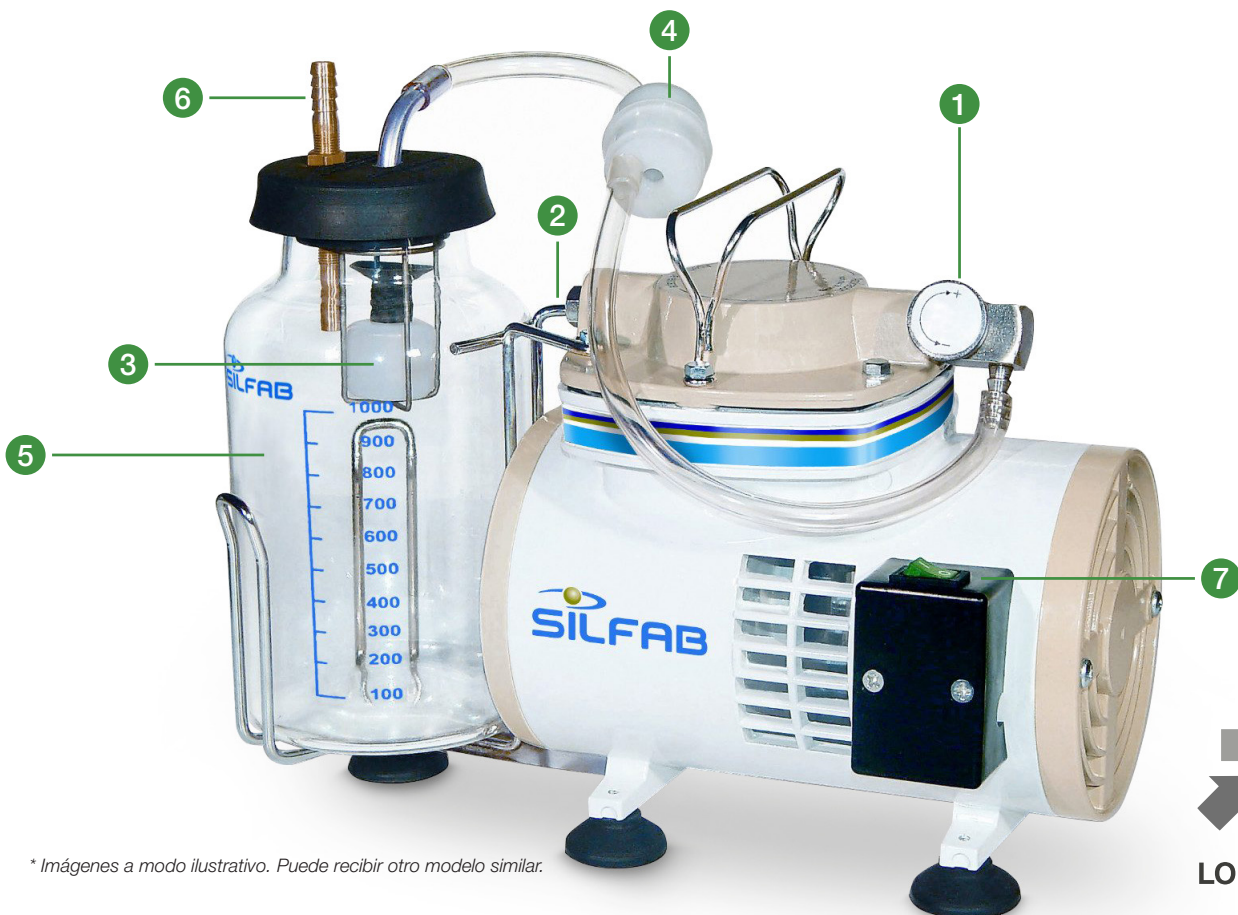

\* Imágenes a modo ilustrativo. Puede recibir otro modelo similar.

# ASPIRADOR DE SECRECIONES

## MODO DE USO

### ANTES DE PONER EN MARCHA

- Colocar el equipo aspirador en una mesa o superficie plana y estable.
- Asegurarse de poder alcanzar los controles fácilmente.  
Conectar el tubo flexible al pico de aspiración (6).
- Tomar las medidas de higiene necesarias previas al comienzo del proceso de aspiración.

### PUESTA EN MARCHA

- Conectar la ficha de alimentación a la red y ponga en funcionamiento el equipo con la llave interruptora (7).

### LUEGO DEL PROCESO DE ASPIRACIÓN


- Apagar el interruptor (7) y desconectar la unidad de la red de alimentación de energía eléctrica.
- Lavar cuidadosamente las partes utilizadas siguiendo las siguientes instrucciones de limpieza:

### LIMPIEZA

- Desconectar el tubo flexible del aspirador.
- Extraer la tapa de goma y el frasco (5) de su base.
- Desechar el contenido del frasco.
- Proceder al lavado y desinfección del mismo.
- Puede limpiar la superficie exterior del equipo con un paño embebido en alcohol.

### MANTENIMIENTO

Para un buen funcionamiento del aparato en el largo plazo, se recomienda verificar cada seis meses, que el filtro esté en buen estado, o en su defecto cambiar el elemento filtrante.

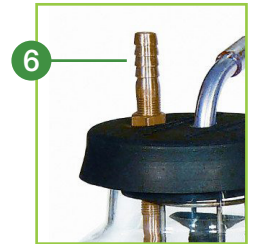

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Antes de proceder a la limpieza o mantenimiento de los elementos del aspirador, corte el suministro de energía eléctrica, desconectando la ficha de alimentación.
- No dejar la unidad sola o desatendida, mientras está encendida.
- No dejar el equipo conectado a la red eléctrica, al alcance de los niños.
- No utilizar el aspirador para otro fin que no sea para el que fue diseñado.
- No bloquear nunca los orificios de salida y toma de aire de la unidad.
- Este aparato no fue diseñado para soportar la inclusión de agentes líquidos en el cabezal compresor.



LOGINDOOR

# ASPIRADOR DE SECRECIONES

## GUÍA DE DETECCIÓN DE PROBLEMAS

FALLA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El equipo no funciona	Falta energía eléctrica	Verificar la existencia de energía eléctrica
	Mal conectado a la red	Controlar la conexión
El motor funciona y el equipo no aspira	Tubo flexible BT63 desconectado o estrangulado	Verificar tubo
	Tubo flexible BT63 deteriorado o perforado	Cambiar tubo
	Tapa mal colocada	Verificar la colocación de la tapa
	Frasco lleno de líquido	Vaciar frasco
	Válvula antidesborde pegada	Efectuar procedimiento de limpieza
El equipo aspira en forma deficiente	Filtro de aire tapado	Cambiar filtro de aire



**LOGINDOOR**  
logística y distribución médica

General Villegas 2430, Sarandi. Buenos Aires, Argentina

[info@logindoor.com.ar](mailto:info@logindoor.com.ar)

[atencionalcliente@logindoor.com.ar](mailto:atencionalcliente@logindoor.com.ar)

**Soporte Telefonico: 0810-362-0222**